

CODE	DIAMETER	LENGTH	BOX
TRAPIT 0810	8G	100mm	10
TRAPIT 0815	8G	150mm	10
TRAPIT 1110	11G	100mm	10
TRAPIT 1115	11G	150mm	10

CODE TRAY	DIAMETER	LENGTH	BOX
TRAPITK 0810	8G	100mm	10
TRAPITK 0815	8G	150mm	10
TRAPITK 1110	11G	100mm	10
TRAPITK 1115	11G	150mm	10

HS[®]
FUTUREMADEPRESENT

TRAPIT

AGO PER BIOPSIA OSTEO-MIDOLLARE

BONE MARROW BIOPSY NEEDLE



HS[®]
FUTUREMADEPRESENT

HS HOSPITAL SERVICE S.P.A

Sede legale/Registered office:

Via Zosimo 13 - 00178 Roma, ITALY

Stabilimento di produzione/Factory:

Via Angela Vacchi 23/25

04011 Aprilia (Latina), ITALY

Tel.: +39 06 9201961

Fax: +39 06 92727871

email: hs@hshospitalservice.com

www.hshospitalservice.com

AGO PER BIOPSIA OSTEO-MIDOLLARE BONE MARROW BIOPSY NEEDLE

TRAP IT è l'unico ago per biopsia osseo-midollare che intrappola il campione e ne assicura il prelievo al 100%.

Caratteristiche dell'ago:

- ago cilindrico, centimetrato, con punta a corona per una facile penetrazione del tessuto osseo, con impugnatura ergonomica con connettore luer lock che consente di distribuire la forza su tutto il palmo della mano e non localmente
- mandrino estraibile, perfettamente accoppiato all'ago, con punta piramidale a tre facce
- dispositivo per l'intrappolamento del campione integrato, caratterizzato da un particolare disegno che consente di imprigionare il frustolo, eliminando la manovra di lussazione
- filo di estrazione a punta smussa, centimetrato, indicato per il recupero del campione
- tappo di protezione ("safety") indicato per ricoprire la punta dell'ago ed evitare pericoli per l'operatore
- tappo luer lock indicato per chiudere l'ago evitando la fuoriuscita di sangue.

L'HS TRAP IT TRAY contiene i seguenti accessori:

telo per campo sterile 60x60cm (2), telo per campo sterile con foro 60x45cm, telo bianco 40x44cm, provetta con formalina 10% 10ml e agitatore, garze 7.5x7.5cm (10) e 5x5cm (5), cerotto 10x8cm, mini bisturi, siringa da 10ml con aghi ipodermici da 18Gx40mm (pre-filtrato) e 21Gx38mm, lidocaina 2% - 10ml, applicatore con spugna, siringa da 20ml, vetrini sabbati 26x76mm (10), porta-vetrini 3 posti (2), provette EDTA 15% 4.5ml (2), busta zip porta-campioni 20x30mm, etichetta paziente.

The **TRAP IT** is the only bone-marrow biopsy needle which traps the sample ensuring its complete removal.

Needle features:

- cylindrical needle with crown tip (to easily penetrate the bone), depth marks and ergonomic handle with luer lock connector (it ensures safe grip and manoeuvrability and force distribution on the palm of the hand)
- removable stylet with pyramidal tip
- integrated device designed to trap the sample into the needle avoiding the deflection technique
- extraction wire with blunt tip intended for sample retrieval
- safety cap intended for needle tip covering to avoid damages for personnel
- luer lock stopper.

The HS TRAP IT TRAY includes:

drape 60x60cm (2), fenestrated drape 60x45 cm, white drape 40x44mm, formalin 10% 10ml and stirring rod, gauzes 7.5x7.5 cm (10), gauzes 5x5cm (5), adhesive bandage 10x8 cm, scalpel, syringe 10 ml, hypodermic needles 18Gx40mm (pre-filtered) and 21Gx38mm, lidocaine 2% 10ml, sponge applicator, 20ml syringe, sliders 26x76mm (10), 3 positions sliders holder (2), specimen tubes with EDTA 15% 4.5ml (2), zip lock bag 20x30mm, data label.

